

הודעה ללקוחות (2)

12.2009

אל: לקוחות דיאמד (ישראל) בע"מ.

שלום רב,

הנדון: בדיקת HIT

על פי הנחיות היצרן, אנו מבקשים להקפיד על ההנחיות הרצ"ב :

את ערכת ה-HIT (מק"ט 050021) יש לאחסן במעבדה באופן מפוצל.

CONTROLS+ PARTICLES בקירור.

ID-CARDS בטמפרטורת החדר.

כמו כן ,

אין להחליף ריאגנטים בין ערכות שונות .

מרכיביה של כל ערכה מהווים יחידה בלתי ניתנת להפרדה.

בברכה,
דיאמד (ישראל) בע"מ.

